

Hágase con el control de su peso
...y de su vida



BIB
PROGRAM



 **INAMED**
HEALTH



SU SOLUCIÓN

Si se pudiera perder peso con la misma facilidad con que se ganó. Se podría imaginar a sí mismo sintiéndose sano, lleno de confianza y luciendo bien. Se ha prometido a sí mismo miles de veces que cambiaría las cosas empezando mañana mismo. Ahora puede hacerlo.

El sistema del Globo intragástrico de BioEnterics® (BIB®) es un programa supervisado médicamente y comprobado internacionalmente, que le ayudará a tomar el control de su peso – sin los riesgos de la cirugía ni medicamentos.

El BIB le ayudará a transformar su cuerpo de forma eficaz y sin peligro, mejorando su salud y enriqueciendo su vida.


EL PROGRAMA BIB

Los expertos están de acuerdo que para que un programa de pérdida de peso tenga éxito no sólo debe ayudarlo a perder peso sino también a mantener la pérdida con el tiempo. Con su propio equipo personal de expertos, el programa BIB combina una manera clínicamente comprobada para reducir el hambre.

El programa consta de tres partes importantes:

Equipo de expertos: Profesionales con experiencia en el área de la pérdida de peso, tales como médicos, nutricionistas, psicólogos y fisioterapeutas trabajarán con usted y diseñarán un programa para ayudarlo a alcanzar y mantener su meta de pérdida de peso. Su equipo estará a su lado en cada paso que dé, alentándole y apoyándole.

Globo intragástrico: El BIB es un globo blando de silicona que se inserta en el estómago y se llena con solución fisiológica (salina) estéril. Con el globo, tendrá

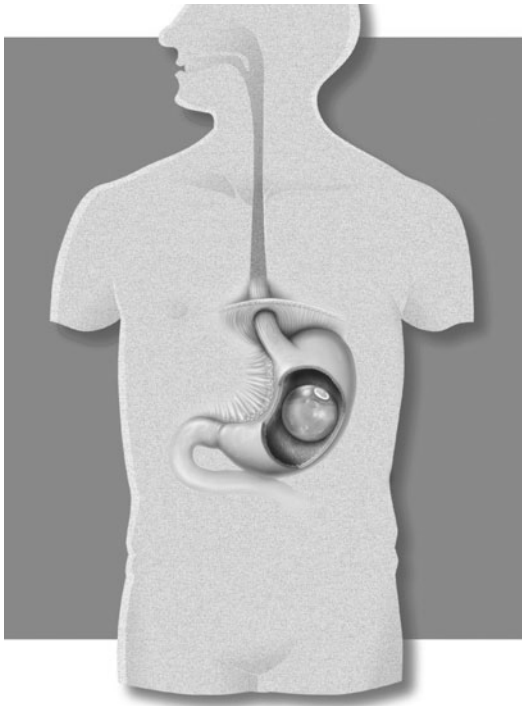

BIB COLOCADO EN EL ESTÓMAGO

una sensación de saciedad o falta de hambre. El globo se retirará después de seis meses. Con la ayuda del BIB, puede adoptar más fácilmente a su estilo de vida los cambios que necesita hacer para perder peso.

Educación y capacitación: Durante las reuniones programadas regularmente con su equipo de expertos, aprenderá los principios que necesita para manejar su peso y fomentar una buena salud a largo plazo. Algunos de éstos incluyen nutrición, ejercicio, comportamientos alimentarios y temas psicológicos relacionados con los alimentos. Mientras esté aprendiendo, será motivado por su próximo éxito y convertirá estos principios en hábitos que le servirán durante el resto de su vida

LA VENTAJA DEL BIB

El programa BIB tiene varias ventajas sobre otros planes de pérdida de peso. Con el BIB puede:

- Tener una sensación de saciedad
- Perder más peso que con otros programas dietéticos
- Ser apoyado por un equipo de médicos expertos
- Aprender principios para tener un éxito a largo plazo
- Contar con los beneficios de un enfoque no quirúrgico, no farmacológico

EL PROCESO BIB

Como candidato(a) para el BIB, usted comenzará su programa reuniéndose con un médico para conversar sobre el programa detalladamente. Una vez que haya programado una fecha para su procedimiento, comenzará a reunirse con su equipo de apoyo y a aprender los principios que se volverán la base de su éxito a largo plazo.

El procedimiento para el paciente externo generalmente dura de 20 a 30 minutos, después del cual será vigilado por un médico antes de volver a su hogar.

Durante la primera semana seguirá una dieta líquida, con instrucciones de beber abundantes líquidos. Después de la primera semana, puede empezar a ingerir una dieta sólida, con las recomendaciones de su nutricionista.

Durante el período de seis meses en el cual el BIB está en su lugar, habrá visitas regularmente programadas con su equipo, para vigilar su progreso. Además, recibirá educación y capacitación sobre los cambios en la nutrición y en su estilo de vida, que deberá realizar para tener un éxito prolongado. Después de extraerse el BIB, deberá continuar reuniéndose con su equipo para obtener apoyo y guía adicionales, cuando los necesite.

¿QUÉ RESULTADOS PUEDO ESPERAR?

Los individuos que participen en el Programa BIB pueden esperar una pérdida considerable de peso en los primeros seis meses. La cantidad de peso que pierda y el tiempo durante el cual mantenga la pérdida, dependerán de lo bien que adopte los cambios a largo plazo en su estilo de vida, relacionados con las comidas y el ejercicio. Las tablas siguientes muestran los resultados logrados en estudios clínicos publicados, en que se usó el Programa BIB.

Pérdida de peso con el Programa BIB (Muestra de resultados publicados)		
Estudio publicado	Número de pacientes	Pérdida de peso promedio (kilos)
Genco, Italia ¹	151	21
Herve, Bélgica ²	320	15
Scherpenisse, Países Bajos ³	489	21

¿ME CONVIENE ESE PROGRAMA?

Para poder participar en el programa usted debe:

- Tener al menos 18 años de edad
- Tener exceso de peso (al menos 10 a 15 kilos más que su peso ideal)
- Estar dispuesto(a) a cumplir con un programa serio, supervisado médicamente

Además, hay ciertas razones médicas que pueden impedir que participe en el Programa BIB. Es posible que no sea un candidato(a) para el procedimiento si presenta alguna de las siguientes condiciones:

- Historia previa de cirugía GI, obstrucción, peritonitis adhesiva o hernia hiatal grande
- Diagnóstico de enfermedad renal, hepática o pulmonar grave
- Tratamiento crónico con esteroides a largo plazo
- No está dispuesto(a) a adoptar los hábitos dietéticos que son cruciales para el éxito del tratamiento
- Adicción a drogas o alcohol durante los últimos 12 meses
- Embarazo

Como es el caso con todos los procedimientos médicos, hay riesgos potenciales de reacciones adversas imprevistas, desconocidas o adversas a los medicamentos y al procedimiento en sí. Plantee a su médico sus preguntas y expectativas sobre el Programa BIB y evalúe los beneficios frente a los posibles riesgos.

EL COMIENZO HACIA UNA VIDA MÁS FELIZ

El Programa BIB es un enfoque simple pero innovador para ayudarle a perder el exceso de peso. Con la orientación de su equipo médico, usted recibirá la educación, el apoyo y la motivación necesarios para hacer cambios reales en su estilo de vida. ¡Averigüe hoy mismo cómo puede comenzar el camino hacia una vida más sana y más feliz!

REFERENCIAS

1. Genco A, Bacci V, Basso MS. Intra-gastric Balloon for the Treatment of Obesity. *Obesity Surgery* 2002.
2. Herve J, Wahlen CH, Bastens B, y colab. BioEnterics Intra-gastric Balloon: ¿Una solución no agresiva para el tratamiento de la obesidad? *Obesity Surgery* 2001.
3. Scherpenisse J. Resultados clínicos con el BIB. *Presentación durante el taller sobre obesidad 2002.*

BIB

BIOENTERICS®
INTRAGASTRIC
BALLOON

PROGRAM

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA OBESIDAD
MÓRBIDA Y EL PROGRAMA BIB, SÍRVASE LLAMAR:

 **INAMED**
HEALTH

CASA MATRIZ EN EUROPA
KILBRIDE INDUSTRIAL ESTATE
ARKLOW, COUNTY WICKLOW, IRLANDA
TEL: 353 402 91320 FAX: 353 402 39505
CORREO ELECTRÓNICO: customerservices@inamed.ie

ESTE PRODUCTO ES PARA EXPORTACIÓN SOLAMENTE.

PRECAUCIÓN: LA VENTA DE ESTE DISPOSITIVO ESTÁ RESTRINGIDA
A MÉDICOS O BAJO SUS ÓRDENES.

EL SISTEMA DEL GLOBO INTRAGÁSTRICO DE BIOENTERICS
NO CONTIENE LÁTEX NI MATERIALES DE CAUCHO NATURAL.

BIB ES UNA MARCA DE BIOENTERICS CORPORATION REGISTRADA EN EE.UU.
©2004 INAMED CORPORATION. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

EL BIB ESTÁ MARCADO QUE CUMPLE CON EL REGLAMENTO CE.